



AÉRÉ | LÉGER | BIODÉGRADABLE

ÉLIMINATION DE L'ORTHÈSE X-LITE® GUIDE D'UTILISATION



À propos de votre orthèse :

- Votre orthèse a été fabriquée en X-Lite®. Il s'agit d'un matériau thermoplastique à basse température, respectueux de l'environnement et biodégradable. C'est le seul matériau pour orthèse fabriqué à partir d'une base de coton pur, imprégné d'un polymère non toxique et sans danger.



Aider l'environnement :

- Votre orthèse X-Lite® peut être éliminée en respectant l'environnement. Vous pouvez la jeter dans votre compost ou l'enfouir dans la terre de votre jardin. Elle se désintègre lentement en eau et en dioxyde de carbone.

Comment recycler X-Lite® en respectant l'environnement :

1

Retirez tous les accessoires (crochets, sangles, rembourrages) et jetez-les avec les ordures ménagères. Si vous avez du mal à détacher le crochet, passez l'orthèse et le crochet sous l'eau chaude pour les ramollir, ce qui devrait faciliter le détachement.

2

Coupez l'orthèse en petits morceaux. Pour ce faire, ramollissez d'abord le matériau en la passant sous l'eau chaude, puis utilisez des ciseaux pour le couper. Veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude, afin de ne pas vous brûler la peau ou de ne pas vous blesser.

3

Jetez votre orthèse X-Lite® usagée dans votre compost.



Si vous ne souhaitez pas composter votre orthèse X-Lite® usagée, vous pouvez la jeter en toute sécurité avec vos déchets ménagers. Elle se désintègrera dans les décharges de la même manière qu'elle le fait lorsqu'elle est utilisée dans le compost.

Remarque : votre orthèse ne doit pas être placée dans la poubelle de recyclage des matières plastiques, car elle n'est pas en plastique.



AÉRÉ | LÉGER | BIODÉGRADABLE

NETTOYAGE DE L'ORTHÈSE X-LITE® GUIDE D'UTILISATION

Nous vous recommandons de laver votre orthèse régulièrement pour qu'elle reste propre et hygiénique. Il est facile de nettoyer votre orthèse, il suffit de suivre les étapes ci-dessous :



1 Remplissez un récipient avec de l'eau tiède et du savon doux pour les mains ou la vaisselle. Fermez les bandes Velcro de l'orthèse.



2 Utilisez vos mains pour créer une mousse dans l'eau et immergez votre orthèse dans le récipient.



3 Frottez doucement l'orthèse pendant 30 à 60 secondes. Vous pouvez utiliser une brosse douce (par exemple une brosse à dents) pour nettoyer les petits trous du matériau.



4 Rincez soigneusement l'orthèse à l'eau froide.



5 Séchez l'orthèse en la tapotant avec une serviette propre. N'essayez pas de la sécher plus rapidement à chaud avec un sèche-cheveux (vous pouvez utiliser que le réglage à froid), car cela pourrait assouplir le matériau et en modifier la forme. Sachez que les bandes Velcro et la couche de tissu de l'attelle X-Lite® Plus prennent plus de temps à sécher.

Vous pouvez utiliser des désinfectants courants à base d'alcool pour essuyer votre orthèse entre deux lavages. Certains produits pouvant contenir d'autres substances, nous vous recommandons de tester d'abord sur une petite surface. Lorsque vous portez votre orthèse à l'extérieur de la maison ou au travail, essayez de porter un gant ou quelque chose de similaire pour la protéger.