



**kinetec®**

## Traction Spécial Traitement Ostéochondrite Primitive de la Hanche

L'Ostéochondrite Primitive de la Hanche est un **accident de croissance** survenant en général entre 4 et 10 ans. Cette pathologie est à prédominance masculine, on recense 1 atteinte pour 750 garçons contre 1 atteinte pour 3700 filles.

Pour une raison inconnue, une des artères chargée de **vasculariser la tête fémorale** de l'enfant peut se boucher. La tête fémorale n'étant plus irriguée, elle va alors se **ramollir et se nécroser** entraînant une **boiterie douloureuse**.

La prise en charge de l'Ostéochondrite n'est jamais anodine. Après un diagnostic confirmé et un court temps d'hospitalisation, elle impose souvent de longs mois en centre de rééducation pour enfant.

En effet, hormis un traitement chirurgical de dernier ressort, le traitement orthopédique occupe la place la plus importante et consiste à décharger la hanche par :

### La mise en traction continue.

#### MP Ostéo



Ce traitement génère hélas son lot de contraintes :

- Traitement parfois difficilement admis par l'enfant.
- Eloignement de l'enfant de son environnement familial et habituel.
- Déplacement journalier, pesant et coûteux pour les parents.
- Coût élevé de la prise en charge de l'enfant en institution.

Le dispositif de traction « MP Ostéo » permet à l'enfant et à sa famille une alternative non négligeable...

### ...un retour et un traitement à domicile.

**LPP : 1101559**

Appareil de rééducation par poulie-thérapie, location hebdomadaire d'un ensemble.

Pour plus de renseignements,  
merci de contacter notre service client :

**Tél. : 03 24 29 85 05**

**Fax : 03 24 33 51 05**

**Kinetec SAS**  
Zone Industrielle de Tournes  
Rue Maurice Périn  
F-08090 Tournes  
France



+33 (0)3 24 29 85 05



+33 (0)3 24 33 51 05




contact@kinetec.fr



www.kinetec.fr

Le montage de Traction Spécial Traitement Ostéochondrite Primitive de la Hanche «MP Ostéo» a été spécialement étudié pour être utilisé sur les lits HMS gamme Euro 3000 et Sotec Neptune.

Néanmoins ce montage peut-être utilisé sur tout type de lit d'hospitalisation à domicile dont les longerons sont en profilés de section intérieure minimum de 21mm en largeur (A) et de x36mm en hauteur (B).

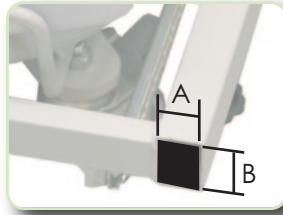

Le «MP Ostéo» ne nécessite aucune formation particulière pour être installé, 5 minutes suffisent :

- 1 • Mettre le lit en position basse.
- 2 • Positionner les deux montants latéraux.
- 3 • Positionner la barre transversale et les protections.
- 4 • Positionner les poulies.

Comme chaque enfant est différent et que la position de la traction doit pouvoir être ajustée par rapport aux indications du Médecin prescripteur, nous avons pourvu le «MP Ostéo» des réglages de base pour cette indication :

- a - Ajustement en hauteur, afin de régler la flexion des hanches, de genoux et de pouvoir décoller le pied du matelas.
- b - Ajustement latéral, afin de régler l'abduction des hanches.
- c - Ajustement de la force de traction, selon le poids de l'enfant et les indications du Médecin Prescripteur, réglage possible de 300gr à 5Kg maximum par jambe ou 10 Kg sur une Jambe.

### Caractéristique technique :

- Dispositif Médical conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe 1.
- Tube Octogonale en Aluminium Anodisé de 34mm sur plat, à haute résistance.
- Mâchoires crantées offrant seize positions.
- Montants latéraux en acier chromé.
- Poids total (sans les deux série de poids) : 6 Kgs
- Garantie 2 ans.



### Accessoire non fournis en standard :

Nécessaire de traction en bande non adhésive. Dimensions 6 x65cm.  
Pour une traction bilatérale, 2 nécessaires de traction sont requis.


#### Comprenant :

- Plaque d'extension avec bande de mousse latex non adhésif.
- Mousse de polyéther.
- Corde de traction.
- Bande de crêpe écrue.



### Référence de commande :

MP Ostéo Complet	4655004122
Nécessaire de traction	4665005318

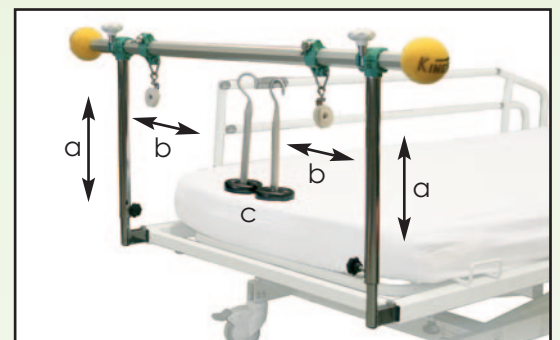

Pour plus de renseignements,  
merci de contacter notre service client :

**Tél. : 03 24 29 85 05**

**Fax : 03 24 33 51 05**

+33 (0)3 24 29 85 05  
+33 (0)3 24 33 51 05  
contact@kinetec.fr  
www.kinetec.fr

**Kinetec SAS**  
Zone Industrielle de Tournes  
Rue Maurice Périn  
F-08090 Tournes  
France