

# kinetec®



## MP Ostéo

Montage Parcellaire  
Spécial Traitement  
Ostéochondrite Primitive de la Hanche

Manuel d'utilisation

FR

Avant toute utilisation lire ce document.

Kinetec SAS se réserve le droit de toutes modifications techniques.

4648000781 – 04/2015

### Kinetec SAS

Zone Industrielle de Tournes  
Rue Maurice Périn  
F-08090 Tournes  
France



+33 (0)3 24 29 85 05



+33 (0)3 24 33 51 05



contact@kinetec.fr



www.kinetec.fr

Votre Contact :



# Avant toute utilisation lire ce document.

Ce montage parcellaire a été spécialement étudié pour être utilisé sur les lits HMS 3000 et SOTEC Neptune. Toute fois il peut-être utilisé sur tout type de lit d'hospitalisation à domicile munis de longerons profilés de section intérieure minimum de 21x36mm.

Avant l'utilisation de ce montage, nous vous rappelons que c'est à votre médecin prescripteur de définir la position exacte de la traction, la force de traction (poids) et de sa durée.

## Description

MP Ostéo	4655004122	Montage parcellaire Spécial Ostéochondrite
<b>Le Montage est composé de</b>		
A	4670024428	Coulisse Supérieure Gauche (x1)
B	4670024410	Coulisse Supérieure Droite (x1)
C	4670024395	Coulisse Inférieure (x2)
B120	4655003512	Barre Octogonale de 120cm (x1)
SP01	4635001304	Boule Jaune Kinetec (x2)
PPO	4655000617	Porte Poulie Ouverte (x2)
P.5000	4655000542	Série de poids avec colonne, 5kg (x2)

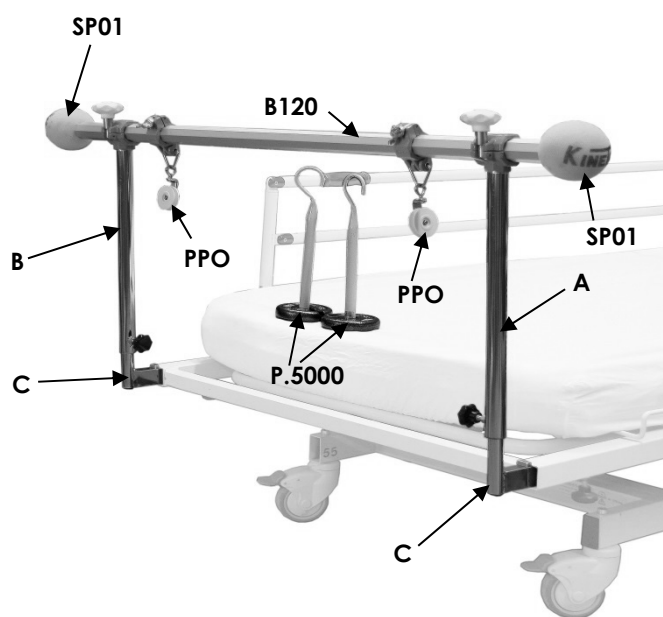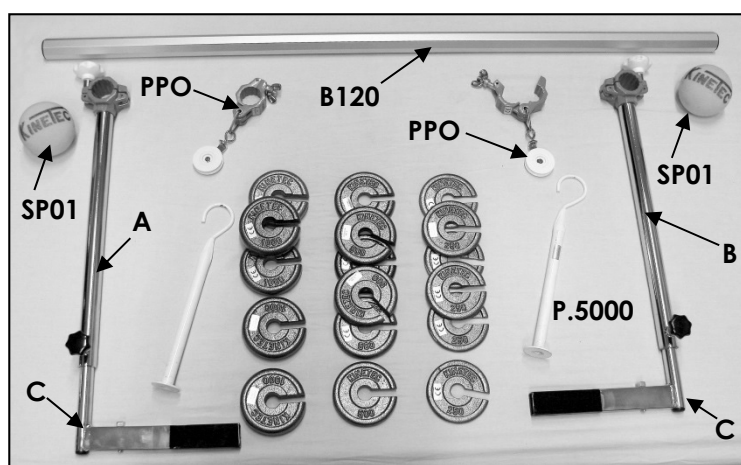


## Sécurité

- Avant d'utiliser le Cadre de Traction, il est essentiel de bien comprendre ce manuel, Il contient les instructions générales pour garantir une sécurité optimale.
- Le système KINETEC® ne doit pas être utilisé avec des composants de cadre de traction d'autres marques.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que le poids du patient et des accessoires soient compatibles avec la charge d'utilisation de sécurité du lit.
- Vérifier avant toute utilisation et chaque semaine la bonne fixation des mâchoires, l'état général des accessoires.
- Le praticien détermine le montage, le protocole et s'assure de sa bonne exécution.
- Les poids doivent être positionnés en dehors du volume du lit et autant que possible à des endroits peu exposés aux passages, aux chocs ou ayant des interactions avec les mouvements du lit.
- En aucun cas les poids ne doivent être fixés au dessus du patient.
- **Toutes les fonctions du lit doivent être bloquées lors de l'utilisation du cadre en traction suspension afin d'éviter un usage incompatible avec la pathologie du patient et/ou du montage réalisé. Les fonctions du lit peuvent être utilisées lorsque le cadre n'est pas utilisé sur le patient. Démontez le cadre lorsqu'il n'est pas utilisé.**
- **Une mauvaise utilisation pourrait causer des blessures au patient ou une détérioration du matériel.**

## Nettoyage

- Utiliser un produit de DESINFECTION (solution à base de PROPANOL / ISOPROPANOL ou à base d'ALDEHYDES) par pulvérisation des SURFACES (éléments métalliques, plastique ou aluminium). Nous conseillons d'insister sur les articulations et zones de rétention comme vis et goupilles.
- Afin d'assurer une hygiène optimale, il est conseillé de nettoyer les habillages et le cadre après chaque patient, tous les consommables du cadre de traction suspension peuvent être jetés sans danger. Vous devez également changer les boules jaunes « SP01 » à chaque patient.
- Recommandations pour une hygiène maximum des habillages.  
Stérilisation des habillages (si nécessaire) :  
Autoclave à 134 degrés pendant 18 minutes.  
Désinfection des habillages : Lavage à 30°C avec utilisation d'un désinfectant au cours du cycle de rinçage. Exemple de produits de désinfection ; solution Bac linge à 0,125% ou Souplianos à 0,125% des Laboratoires ANIOS. Nous consulter pour obtenir la liste des distributeurs dans votre pays.

## Montage

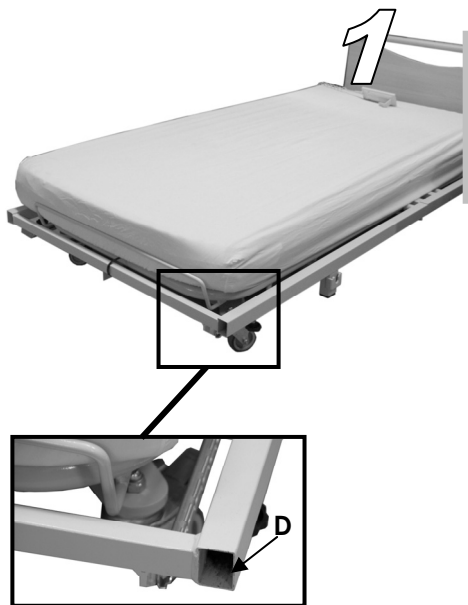

### Étape 1


Le montage du MP Ostéo se fait lorsque le lit est en position basse.

Démonter le panneau de pied lit.

### Étape 2

Insérer les deux coulisses inférieures (C) dans les longerons du lit (D), jusqu'à la butée (E), puis serrer les vis de blocage (F).

Positionner les deux coulisses supérieures (B) et (A), en faisant attention que les boutons de blocages (G) soient positionnés vers l'intérieur du lit, puis serrer ceux-ci.

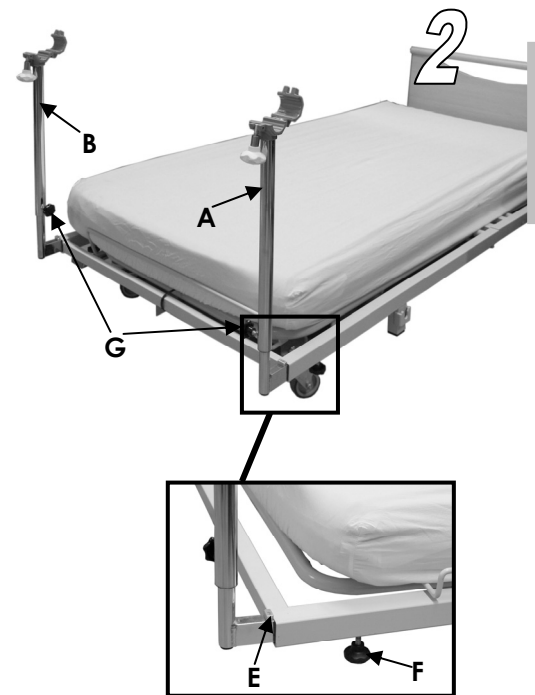



### Étape 3

Positionner la barre B120, puis fermer les mâchoires (H) et serrer les boutons blancs (I).

Positionner les deux boules jaunes SP01.


### Étape 4

Positionner les deux poulies PPO.

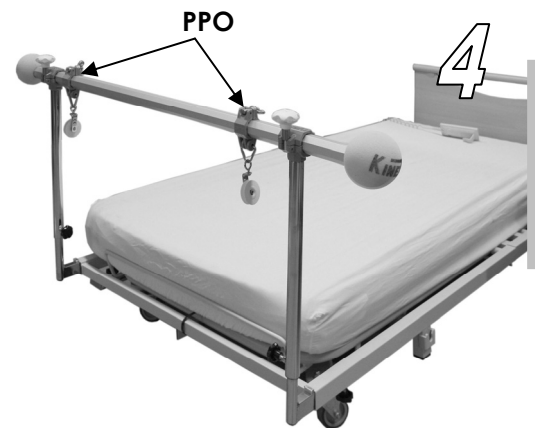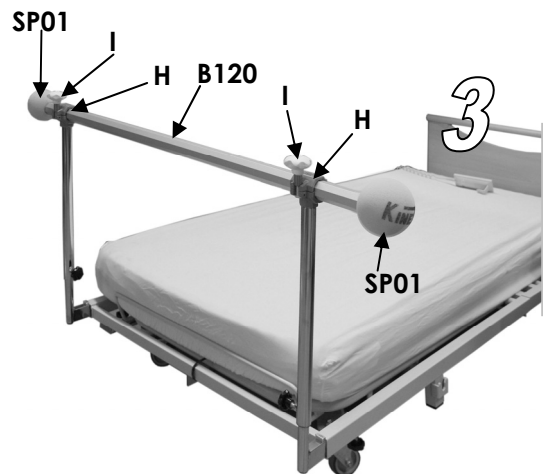

## Utilisation - Réglages

- Assurez-vous du déplacement du lit ou de sa manipulation qu'aucun élément extérieur ne puisse heurter le cadre. (Table de nuit, tous autres meubles)
- Pour le positionnement du bandage, se référer à la notice livrée avec celui-ci.
- Réglage – suivant les indications de votre médecin prescripteur :
  - Abduction de hanche** : le positionnement des poulies PPO permet une amplitude plus ou moins importante d'abduction de hanche.
  - Élévation du pied** : le réglage en hauteur de la barre B120 permet le positionnement de la jambe.
  - Poids** : suivez les indications du médecin prescripteur, généralement la traction ne doit pas dépasser 1/10<sup>ème</sup> du poids du patient (ex : pour un enfant de 30Kg la traction maximum par jambe est de 3Kg)

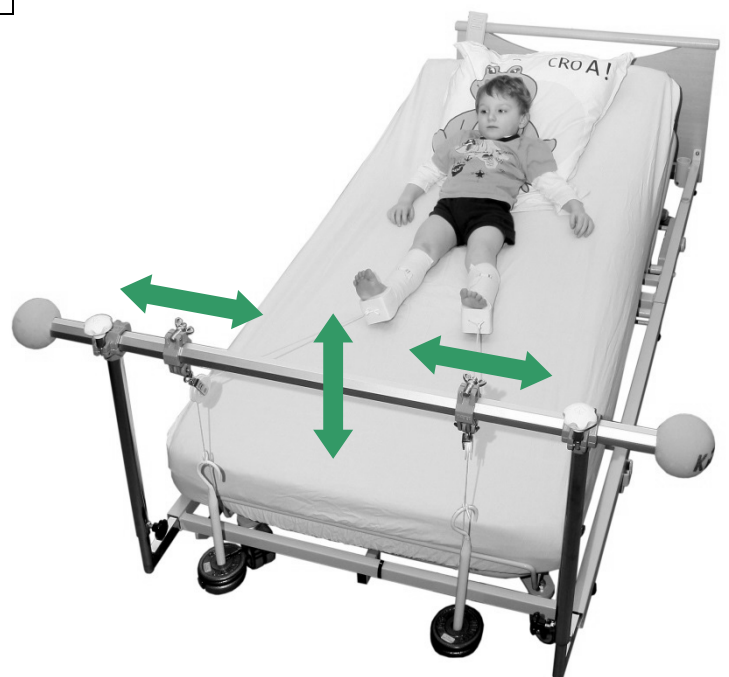

## Caractéristiques techniques



- Produit : Montage Parcelaire « MP Ostéo » conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de classe I.  
Tubes en aluminium anodisé et mâchoires en aluminium Époxy.

- Environnement

- Conditions de stockage / transport:      Température ambiante : -40°C à +70°C.  
   Humidité relative : jusqu'à 90%.
- Conditions d'utilisations :                      Température ambiante : +10°C à +40°C.  
   Humidité relative : jusqu'à 80%.

## Conditions de garantie

La garantie KINETEC® est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses. Kinetec SAS garantit son cadre de traction suspension 2 ans contre tous vices de fabrication, à partir de la date d'achat par le consommateur.

Kinetec SAS est le seul habilité à juger de l'application de la garantie sur son système.

La garantie ne peut intervenir si le système a fait l'objet d'un usage anormal ou a été utilisé dans des conditions d'emploi autres que celles contenues dans notre manuel d'utilisation.

La garantie ne s'appliquera pas non plus en cas de détérioration ou accident provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien provenant d'une transformation du matériel ou d'une tentative de réparation du matériel.

Demandez notre catalogue sur les  
cadres complets et accessoires de  
Traction /Suspension



### Kinetec SAS

Zone Industrielle de Tournes  
Rue Maurice Périn  
F-08090 Tournes  
France



+33 (0)3 24 29 85 05



+33 (0)3 24 33 51 05



contact@kinetec.fr



www.kinetec.fr

**kinetec**®