



Guide d'utilisation rapide

1 Contenu

Dés intelligents




Coques à dés x2



Type C USB

USB 2.0

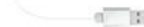

Pochette

2 Comment recharger

La face 5 du dé est utilisée pour le chargement



Maintenir 10 secondes pour une recharge complète

3 Installer l'application Bobodice



Consultez le guide d'information pour connaître la liste des appareils compatibles

4 Se connecter et s'entraîner



Votre dé intelligent sera activé lors de la première connexion

Dépannage

Chargez votre dé avant de vous connecter à l'application

Dans les paramètres de votre appareil, assurez-vous que le Bluetooth est activé

Les appareils Android doivent activer le "service localisation" (GPS) pour le fonctionnement du Bluetooth

**Nous sommes là pour vous !
Contactez-nous et trouvez plus d'informations sur :
www.bobo-balance.com**