

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Appareil de récupération par flux intermittent d’eau froide
- Bac de 6L à remplir d’eau et de glaçons (ou avec des pains de glace)
- Température de l’eau entre 1°C et 10°C (ajustable en fonction de la quantité de glaçons)
- Cycle de compression graduel avec diffusion de froid
- Pompe puissante : 700L/h et 25W, permettant l’utilisation de 2 enveloppes simultanément
- Facile d’utilisation avec seulement 4 boutons : démarrer/pause, marche/arrêt et la sélection des programmes (+/-)
- 9 programmes, allant d’un niveau faible de pression à élevé, d’une durée de cycle entre 20 et 60 minutes et d’un temps de pression/décompression de 8 à 20 secondes
- Fonctionnement silencieux et écran LCD
- Poids : 4 kg
- Garantie 2 ans

RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS
DA0302X102	Dr Active Cryo Pro XL Appareil Seul (accessoire de vidange + tuyau connecteur)
KIT	
DA0302X412	Dr Active Cryo Pro XL Kit Complet Genou (DA0302X102 + DA0302X201 + DA0302X301)
ENVELOPPES	
DA0302X201	Dr Active Cryo Pro XL 360 Enveloppe Genou
DA0302X202	Dr Active Cryo Pro XL Enveloppe Epaule
DA0302X203	Dr Active Cryo Pro XL Enveloppe Cheville
DA0302X204	Dr Active Cryo Pro XL Enveloppe Universelle
DA0302X205	Dr Active Cryo Pro XL Enveloppe Jambe
DA0302X206	Dr Active Cryo Pro XL Enveloppe Jambe Longue
DA0302X207	Dr Active Cryo Pro XL Enveloppe Hanche/Dos
DA0302X208	Dr Active Cryo Pro XL Sangle Extension
ACCESSOIRES	
DA0302X301	Dr Active Cryo Pro XL Sac de Transport
DA03020013	Dr Active Cryo Pro XL Transformateur
DA03020031	Dr Active Gamme Cryo Pro Batterie Portable 2.0
DA0302X303	Dr Active Cryo Pro XL Tuyau Double Connecteur



Kinetec SAS
Zone Industrielle de Tournes
Rue Maurice Périn
F-08090 Tournes
France
Tel: +33 324 29 85 05
contact@kinetec.fr
www.kinetec.fr

dr.aktive®

dr.aktive®

CRYO PRO™ XL CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE



LES BÉNÉFICES DE LA CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Le Cryo Pro™ XL, dispositif de cryothérapie, qui combine le froid et la compression, agit en resserrant les vaisseaux sanguins, ce qui réduit l'œdème et l'inflammation. La thérapie par le froid peut également contribuer à réduire l'importance des ecchymoses en ralentissant le flux sanguin vers une zone blessée.

La thérapie compressive par le froid peut également calmer les spasmes musculaires, minimiser les ecchymoses et apaiser les terminaisons nerveuses, ce qui favorise une guérison rapide et efficace de toute une série de blessures musculaires, tendineuses et ligamentaires.

En outre, la compression de froid peut contribuer à réduire la dépendance du patient à l'égard des analgésiques à la suite d'une blessure.

- Soulage la douleur
- Réduit l'œdème et l'inflammation
- Préviend ou limite les ecchymoses
- Ralentit ou arrête les saignements

TRANSPORTABLE

Le Cryo Pro™ XL a été conçu pour être pratique quel que soit l'endroit où vous souhaitez utiliser l'appareil. La portabilité n'est pas un problème pour le Cryo Pro™ XL.

L'appareil est livré avec une poignée qui est conçue pour s'équilibrer lorsque de l'eau et de la glace se trouvent dans le réservoir. Le Cryo Pro™ XL peut être alimenté via une batterie portable, ce qui vous permet d'utiliser sa thérapie de compression n'importe où, n'importe quand. Cette portabilité rend la thérapie par compression froide pratique pour tous.

Le sac portable Cryo Pro™ XL est conçu pour contenir l'appareil et dispose d'une sangle confortable et réglable. Le sac dispose d'un espace de stockage supplémentaire pour ranger l'accessoire de vidange, l'alimentation secteur et la batterie, les tuyaux doubles et toutes les enveloppes supplémentaires.

Utilisable
sur
batterie



Thérapie compression
froide haute performance

Ne nécessite que de la
glace et de l'eau

Gamme complète
d'enveloppes



FACILE D'UTILISATION

Le Cryo Pro™ XL est un produit simple à utiliser, ne nécessitant que de la glace, de l'eau et de l'électricité (secteur ou batterie). Les enveloppes sont simples et faciles à appliquer - une taille unique pour toutes, l'appareil dispose d'un affichage numérique simple avec 9 programmes pour contrôler la durée de la séance et le niveau de compression.

Le Cryo Pro™ XL est simple à vider et à nettoyer. Retirer l'eau de l'unité principale est facile grâce au couvercle amovible. Les enveloppes sont faciles à vidanger, à l'aide de l'accessoire de vidange fourni.



"favoriser une guérison
rapide et efficace
de nombreuses
pathologies"

ENVELOPPES

Le Cryo Pro™ XL vous permet de cibler des zones spécifiques de douleur ou de gonflement grâce à notre gamme complète d'enveloppes. Il s'agit notamment du genou, épaule, cheville, universelle, jambe complète, jambe longue complète et de notre toute nouvelle enveloppe, l'enveloppe pour le dos et les hanches.

Enveloppe pour le dos et les hanches

Peut être appliquée et portée comme une ceinture sur les zones affectées.

Sangle d'extension

Utilisée pour donner plus d'espace et de place lors du port de l'enveloppe, pour un confort maximal pendant la convalescence.

Tuyaux doubles

À utiliser avec le Cryo Pro™ XL pour permettre l'utilisation simultanée de deux enveloppes.

